

## Comunicadores QuickTalker 7, 12 e 23




### Características



#### 1. Ligar o Comunicador

Ponha quatro pilhas AA no compartimento que está na parte traseira do aparelho. Ligue o aparelho no botão ON/OFF.

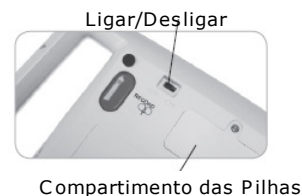

#### 2. Selecionar Nível

Selecione o nível (1-5) no botão vermelho situado na parte dianteira do aparelho.



### 3. Gravar Mensagens


#### a) Iniciar Modo de Gravação

Mantenha premido o botão RECORD que se encontra na parte traseira do aparelho até que se acenda a luz vermelha.



#### b) Gravar Mensagens

Mantenha premida a célula que deseja gravar, comece a falar após o sinal sonoro, deixe de carregar. Repita para todas as células que deseja gravar.

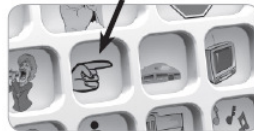

#### c) Sair do Modo de Gravação

Carregue no botão RECORD. As luzes apagar-se-ão.

Nota: Após 20 segundos de inatividade, o aparelho sai automaticamente do modo de gravação.

## Garantia

Os comunicadores QuickTalker 7, 12 e 23 têm garantia de 24 meses a partir da data de compra contra defeitos de fabrico ou de componentes. O aparelho foi desenhado para utilização doméstica, educacional e comercial. A utilização fora destas áreas invalida a garantia. Reparações ou modificações não autorizadas, imersão em líquidos ou ligação a outros equipamentos que não os mencionados invalidam a garantia.